

CALAMUS[®] DUAL

DOWNPACK & BACKFILL

SZYBKE I SZCZELNE WYPEŁNIANIE KANAŁÓW KORZENI ZĘBOWYCH



*Trwałe i pozwalające oszczędzić czas
trójwymiarowe wypełnianie kanałów korzeni zębowych*

DENTSPLY
MAILLEFER

ŁATWE W UŻYCIU

Wypełnianie kanałów nie było nigdy tak łatwe!

- Przyciski „plus” i „minus” służące ogólnemu sterowaniu
- Ustawienia można dostosować indywidualnie
- Przejrzysty wyświetlacz i przełączniki
- Możliwość wcześniejszego zaprogramowania 2 wariantów ustawień
- Łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu

UDOGODNIENIA I PRZYCISKI KONTROLNE

Urządzenia zaprojektowane dla Twojego komfortu

- Intuicyjne użytkowanie i obsługa urządzenia
- Ergonomicznie zaprojektowane rękojeści o dużym kącie działania
- Włączanie za pomocą giętkiego silikonowego pierścienia, czułego na najłżejszy dotyk
- Wejścia do kanałów korzeni zębowych wyraźnie widoczne dzięki wąskim rękojeściom
- Sygnały dźwiękowe i wizualne odnoszące się do działania i bezpieczeństwa umieszczone na rękojeści
- Okienko na rękojeści wskazujące zawartość wkładu gutaperki

SZYBKIE I NIEZAWODNE

Wypełnianie boczne lub pionowe? Lepsze rezultaty z urządzeniem Calamus®

- Kondensacja pionowa jest metodą szybszą, pozwalającą uzyskać trwałe, szczelne, trójwymiarowe wypełnienie kanału korzenia zębowego
- Solidne wypełnienie kanałów bocznych
- Minimalne ryzyko złamań korzenia zębowego
- Wypełnianie gutaperką do pożądanego poziomu w celu umieszczenia wkładu z włókna szklanego

PROCEDURA KONDENSACJI W PRZYWIERZCHOŁKOWYM ODCINKU KANAŁU (DOWNPACK)

- Upychacze różnych rozmiarów
- Upychacze łatwe do założenia
- Upychacze mogą być stosowane do kondensacji w przywierzchołkowym odcinku kanału i odcinania gutaperki
- Końcówka do sprawdzania żywotności miazgi na ciepło

PROCEDURA WYPEŁNIANIA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ I DOKORONOWEJ KANAŁU

- Temperatura i przepływ mogą być ustawiane indywidualnie
- System Micromotor kontroluje precyzyjnie wypływ gutaperki
- Szybka wymiana wkładów dzięki konstrukcji nasadowej – łatwość użycia oraz usuwania i minimalizacja potrzeby czyszczenia rękojeści
- Giętkie i bardzo długie, przewodzące ciepło kaniule ze stopu srebra odpowiednie również dla zakrzywionych kanałów korzeni zębowych
- Jeden wkład wypełnia około 4–6 kanałów korzeni zębowych



CALAMUS® DUAL KIT REF A 1300

- 1 urządzenie Calamus® Dual
- 1 upychacz mały ISO 40 – zwężający się do .03
- 1 opakowanie 10 wkładów 20G
- 1 opakowanie 10 wkładów 23G

- REF A 1110
- Upychacz Calamus® S ISO 40 – zwężający się do .03
- REF A 1120
- Upychacz Calamus® MISO 50 – zwężający się do .05
- REF A 1130
- Upychacz Calamus® L ISO 60 – zwężający się do .06

- REF A 1150
- Calamus® Końcówka reakcji na ciepło (sprawdzanie żywotności miazgi)
- REF A 1210
- Wkłady z gutaperką, 20G = 0,8 mm (opakowanie 10 nabojów)
- REF A 1220
- Wkłady z gutaperką, 23G = 0,6 mm (opakowanie 10 nabojów)

Dystrybucja:

DENTSPLY
MAILLEFER