



Nowy wymiar estetyki G-ænial z GC.



Dr Tapia,
Hiszpania

Koniec poszukiwań. Jako uniwersalny materiał do wypełnień o doskonałej, niewidocznej estetyce G-ænial z GC wydaje się być optymalny.

Oczekujesz najprostszego sposobu, aby uzyskać efekt niewidocznego wypełnienia? GC przedstawia G-ænial Anterior i Posterior, dwa światłoutwardzalne materiały do wypełnień stworzone dzięki bogatemu doświadczeniu i obszernej wiedzy GC w dziedzinie materiałów dentystycznych z uwzględnieniem sugestii od wiernych użytkowników Gradia Direct.

Możesz polegać na wieloletnim doświadczeniu i technologicznym know-how zawartym w G-ænial, aby wesprzeć Twoje umiejętności i zdolność do odtworzenia w każdym wypełnieniu estetyki zgodnej z naturą.

G-ænial - przyjazny w użyciu materiał do wypełnień, który jest wskazany do wysoko estetycznej odbudowy jedno lub wieloodcieniowej we wszystkich klasach ubytków.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Tel. +32.16.74.10.00
info@gceurope.com
www.gceurope.com


GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
Tel. +48.12.425.14.74
poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC



Naturalne odbijanie światła zapewnia naturalny wygląd wypełnienia

Efekt kameleona, jaki można uzyskać już przy użyciu jednego odcienia G-ænial jest na tak wysokim poziomie, że wypełnienie nie tylko dopasowuje się do otaczającej go naturalnej tkanki zęba, ale wręcz zlewa się z nim i staje się **estetycznie niewidoczne**. Zjawisko to materiał G-ænial zawdzięcza głównie swojej zróżnicowanej budowie, dzięki której naśladuje **właściwości odbijania światła charakterystyczne dla naturalnego zęba**.

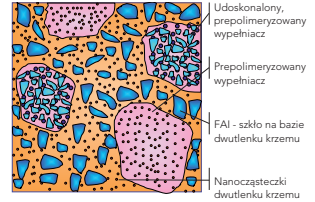

Koncepcja odcieni zorientowana na efekt końcowy

G-ænial oferuje dentyście elastyczność. G-ænial można stosować we wszystkich technikach: od estetycznie niewidocznej odbudowy **pojedynczym odcieniem** po najbardziej estetyczne odbudowy **kilkoma odcieniami**. W przypadkach nie wymagających techniki warstwowej wystarczające jest zastosowanie odcienia standardowego do uzyskania gwarantowanego rezultatu: to co widzisz jest tym co uzyskasz. Istnieją jednak sytuacje, w których preferowana jest technika wieloodcieniowa na przykład, gdy konieczna jest rozległa odbudowa. Asortyment G-ænial oferuje dwa dodatkowe rodzaje odcieni do wyboru zwane odcieniami specjalnymi, które są nakładane jako warstwy spodnie (**odcienie wewnętrzne zwiększające nieprzezierność**) lub jako warstwy wierzchnie (**odcienie zewnętrzne do uzyskania przezierności**) względem odcieni standardowych.



Powszechnie stosowaną zasadą przy wykonywaniu wypełnień jest odtworzenie koloru i przezierności naturalnego szkliwa odpowiedniego do wieku pacjenta. Zgodnie z tym odcień szkliwa **Junior Enamel (JE)** wybiera się w przypadku młodych pacjentów, **Adult Enamel (AE)** dla pacjentów w wieku dojrzałym, a **Senior Enamel (SE)** dla pacjentów w wieku podeszłym.




Łatwość pracy

G-ænial jest jednym z niewielu materiałów kompozytowych, które można nazwać przyjaznymi dla użytkownika, nie tylko ze względu na zaawansowany system odcieni, lecz również dlatego, że jest kompozytem oferującym wyjątkową łatwość stosowania. **G-ænial Anterior** ma taką samą konsystencję jak Gradia Direct Anterior. Materiał był przez ponad 6 lat testowany i, według zgodnej opinii jego użytkowników, konsystencja jest tym, co czyni go godnym szczególnej uwagi. Lepkość G-ænial Posterior została odpowiednio dostosowana, ponieważ nakładanie w odcinku bocznym często wymaga materiału, który poddaje się upychaniu. Mając taką konsystencję **G-ænial Posterior** daje się łatwo kształtować, ma właściwości tiksotropowe i dobrą adaptację do ścian ubytku.



Uproszczona kontrola

Mimo, że estetycznie niewidoczne, zarówno G-ænial Anterior jak i Posterior są bardzo dobrze widoczne na zdjęciach rtg. Wykorzystują unikalną, opatentowaną przez GC technologię HDR (**High-Density Radiopaque** - nieprzepuszczalnego dla promieni rtg wypełniacza o dużej gęstości); kontrastowość G-ænial jest znacznie zwiększona, ale nie kosztem estetyki.

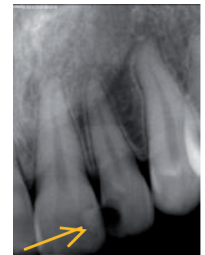

Dr Sabbagh, Belgia

Właściwości fizyczne zapewniające doskonale długotrwałe wypełnienia

Dla zwiększenia estetyki G-ænial daje się **szybko i łatwo wypolerować** na gładką, błyszczącą powierzchnię. G-ænial jest **wytrzymały i elastyczny** dzięki wysokiej odporności na złamania i niskiemu modułowi elastyczności, co pozwala przeciwstawić się siłom zgniatającym i zgrzyzowym, a także zapobiec rozprzestrzenianiu się pęknięć. Wypełnienia z G-ænial są także **bardzo trwałe** dzięki wyjątkowej odporności na starcie powierzchni żującej.

G-ænial Anterior jest dostępny w 22 odcieniach w trzech rodzajach przezierności.



- XBW: Extra wybielony biały
- BW: Wybielony biały
- CV: Szyjkowy
- CVD: Szyjkowy ciemny
- AE: Szklivo dojrzałe
- TE: Szklivo przeziarne
- SE: Szklivo starcze
- IE: Szklivo brzegu siecznego
- JE: Szklivo młodzieńcze
- CVE: Szklivo szyjkowe

G-ænial Posterior jest dostępny w 6 odcieniach w dwóch rodzajach przezierności.



Obydwa materiały są oferowane w strzykawkach i ampułkach Unitip.

